

نحوه استفاده از بارکد خوان در دستگاه pc

*دستگاه در ران کاری نباشد و سپس

ابتدا به منوی Navigation و سپس configuration وبعد assay activation رفته و در انتها عکس بارکد بالای صفحه را می زنیم.

حال بارکد ارسالی روی یک سطح صاف قرارداداده و بارکد خوان را در فاصله 7سانتی متری بارکد ارسالی قرار دهید بصورت کاملاً عمود رو به پایین از یک سانتی متر قبل از مربع مشکی رنگ تا یک سانتی متر بعد از مربع نور را از بالا به پایین بکشید. سپس بارکدخوان بوق می زند و در صورت پیغام successful آیتم save را می زنیم.